



LA SÉCURITÉ À CHAQUE PAS

CareMat

LE TAPIS DE DÉTECTION SENSIBLE À LA PRESSION

APPLICATION

La prise en charge des personnes atteintes de démence et des patients prédisposés aux chutes et aux fugues représente un surcroît de travail pour les aides-soignants. Car il s'agit de ne pas restreindre inutilement la liberté de mouvement des personnes afin de leur préserver une bonne qualité de vie. Le tapis de détection CareMat sensible à la pression apporte dans ce contexte un soutien optimal.



Domaines d'application ■ Foyers de personnes âgées, maisons de retraite médicalisées, hôpitaux, services psychiatriques, habitat accompagné et maintien à domicile

Installation ■ Simple branchement au système d'alerte
■ Généralement au pied du lit médicalisé ou devant la porte de la chambre

Propriétés ■ Signal d'alarme fiable
■ Utilisation mobile
■ Matériau antidérapant, adhérent bien au sol
■ Facilité d'entretien et surface hygiénique
■ Poignées de transport pour un maniement aisé
■ Boîtier pratique pour la version câblée ou radio
■ Conception solide et durable

Avantages pour le personnel soignant ■ Prévention des chutes grâce à l'intervention rapide du personnel soignant
■ Diminution du nombre de rondes de nuit
■ Réduction des frais consécutifs pour les services de santé

Avantages pour le résident ou le patient ■ Liberté de mouvement totale
■ Sentiment de sécurité du fait de la visibilité du système de protection
■ Amélioration de la qualité de vie

SITUATION COURANTE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SOINS

Dans les établissements de soins, le tapis CareMat offre une importante contribution pour préserver la qualité de vie des résidents tout en apportant au personnel soignant un soutien précieux. Le tapis CareMat est simplement posé au pied du lit médicalisé ou devant la porte de la chambre, et branché par câble ou par radio au système d'alerte. Dès qu'une personne pose le pied sur le tapis, celui-ci déclenche un signal transmis au personnel soignant. Les risques de chute et les dangers qui résultent d'une fugue ou d'une désorientation peuvent être considérablement réduits.

1



Les personnes atteintes de démence sont souvent agitées et désorientées. Elles essaient donc souvent de se lever seules.

2



Le tapis CareMat apporte ici une protection optimale. Dès qu'une personne pose le pied sur le tapis, celui-ci déclenche un signal d'appel transmis au système d'alerte. Le personnel soignant peut alors rapidement intervenir.

3



L'intervention rapide du personnel soignant permet d'éviter une chute éventuelle. Le tapis permet également d'éviter que le résident ne quitte les lieux sans surveillance.

4





CareMat – Soutien optimal pour le personnel soignant et le résident.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le CareMat peut être placé au pied du lit médicalisé ou devant la porte de la chambre, c'est pourquoi il est disponible en version câblée ou radio. Le câble comme la pile de l'émetteur radio se remplacent facilement.

- CareMat A** ■ 1100 x 700 x 9 mm, 8.2 kg
- CareMat B** ■ 700 x 400 x 9 mm, 3.2 kg
- CareMat C** ■ 1100 x 700 x 9 mm, 6.5 kg
- Matériau** ■ Polyuréthane
- Surface** ■ Structure antidérapante
- Couleur** ■ Careyellow, Caregrey
- Sortie de contact** ■ Câble: Contact de travail ou de repos, mise en circuit à résistance
 - Radio: Protocole radio spécifique au fabricant
 - Wifi: Intégration réseau via balise Asset
- Liaison** ■ Confectionnée par votre interlocuteur en fonction de votre système de communication

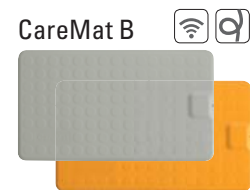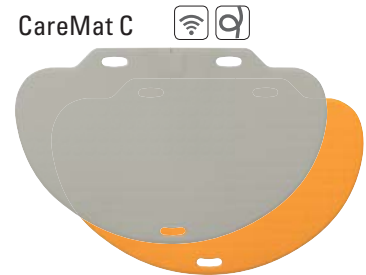

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

BBC Bircher Smart Access compte parmi les principaux fabricants internationaux de systèmes de détection sensibles à la pression ou sans contact assurant la sécurité pour l'homme, les véhicules et installations de portes automatiques dans l'industrie, les transports publics et le domaine de la santé. Le siège de l'entreprise se trouve à Beringen, en Suisse.



Votre partenaire CareMat

Votre fabricant CareMat

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen

Tél. +41 52 687 11 11
Fax +41 52 687 11 12
www.caremat.ch
info@bircher.com